



**lamascarilla**  
PERSONALIZADA

Gracias por adquirir nuestras mascarillas personalizadas LMPMD21

## ESPECIFICACIONES

Nuestras mascarillas han sido certificadas por el fabricante en el laboratorio autorizado amslab con el nº de report 21-010923.

Están compuestas de dos capas de tela, una exterior de poliéster 100% sublimada y otra interior compuesta de algodón 100% para minimizar alergia. Ambos tejidos tienen la certificación Standard 100 OEKOTEX en vigor, que asegura su conformidad a la norma ISO17050-1 para su uso en contacto con la piel de humanos sin elementos tóxicos ni alérgenos, tanto adultos como niños. Todos los colorantes del tejido en contacto con la piel son antialérgicos y conforme a las normas OEKO-TEX-II.

Están fabricadas siguiendo la normativa europea CWA17553:2020

(tipo 1, >90%, para profesionales en contacto con público) y la norma española UNE0065.

La eficacia de filtración bacteriana antes del primer uso es >92% y se mantiene >90% tras 50 ciclos de lavado a 60º. La respirabilidad es de 20+-2 Pa/cm2 antes del primer uso y llega a 16+-2 Pa/cm2, tras 50 ciclos de lavado a 60º (máximo permitido 60 Pa/cm2) lo que le asegura gran protección, comodidad y transpirabilidad.

\* (Método de test UNE-EN14683:2019+AC:2019)

Fabricado en España.

Tras su vida útil, desechar en el contenedor gris.

Instrucciones de uso en distintos idiomas, tienda online y mucho más siguiendo este enlace:

<https://lamascarillapersonalizada.com/saber-mas>

## PRECAUCIONES

**ADVERTENCIA:** No es un producto sanitario, ni un Equipo de Protección Individual (EPI). Este producto está destinado a población sin síntomas de enfermedad.

Debe ser lavada antes del primer uso.

Esta mascarilla permite, gracias a su tejido, una utilización prolongada (50 usos garantizados por laboratorio), teniendo siempre el cuidado de lavarla a 60º y secarla al aire tras su uso.

**NO NECESITA FILTROS INTERCAMBIABLES**



## ¿SABE COLOCARSE CORRECTAMENTE LA MASCARILLA?

PASO 1



Lave sus manos con agua y jabón antes de usar una mascarilla.

PASO 2



El lado coloreado hacia afuera y el lado blanco hacia adentro.

PASO 3



Enlace las gomas por detrás de sus orejas sin tocar el interior.

PASO 4



Estire la mascarilla para cubrir desde la nariz hasta la boca.

FINAL



Ha finalizado la colocación de la mascarilla con seguridad.

## ¿CÓMO LAVARSE LAS MANOS EN PROFUNDIDAD?



**Mójese** las manos con agua corriente limpia, tibia o fría.



Cierre el grifo y **enjabónese** las manos abundantemente hasta que haga espuma.



**Frótese** entre los dedos por el haz y el envés de la mano.



Ponga **especial cuidado** debajo de las uñas.



**No descuide** sus pulgares, en especial el arco interior.



**Tampoco debe olvidarse** de los nudillos, frótelos contra la palma de su mano.



Finalmente, **es aconsejable** frotar desde las muñecas a medio antebrazo.



**Y, sobre todo, no olvide cerrar el grifo mientras se está enjabonando y frotando; es responsabilidad de todos preservar los recursos naturales.**

## COMO QUITARSE LAS MASCARILLAS DE FORMA SEGURA



En primer lugar, lave sus manos con abundante agua y jabón durante, al menos, 20 segundos.



Al quitarse la mascarilla, tenga cuidado y solo toque la goma por detrás de las orejas. Primero saque una y después la otra.



Utilice una bolsa de plástico individual para introducir la mascarilla.



Tire la bolsa de plástico a la basura en caso de ser una mascarilla desechable, **o si es reutilizable** déjela en ella hasta [lavarla en la lavadora](http://lamascarillapersonalizada.com).



Lávese las manos de nuevo, para evitar posibles transferencias.



Ha finalizado la retirada de su mascarilla con seguridad.